

## Gebrauchsanweisung

Mund-Nasen-Schutzmaske, waschbar Art.-Nr.: 510.527 / 510.530 Stand Mai 2020







## RICHTIGER UMGANG MIT SCHUTZMASKEN

- 1. Vor dem Anlegen der Stoffmaske die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren.
- 2. Die Stoffmaske aus der Schutzhülle nehmen, die Innenseite dabei nicht berühren.
- 3. Die Schlaufen hinter den Ohren befestigen.
- **4. Die Maske soll eng anliegen und durchgehend Mund und Nase bedecken.**Während des Tragens die Maske **nicht berühren**, auch **nicht um den Hals tragen.**
- 5. Ist die Maske durchfeuchtet, muss sie gewechselt werden.
- 6. Nach Gebrauch zum Abnehmen der Maske an den seitlichen Schlaufen greifen und nicht die Vorderseite berühren. Nach dem Abnehmen immer gründlich die Hände waschen oder desinfizieren.
- 7. Die Maske **sofort bei 40° C waschen** oder bis zum Waschen in einem luftdicht geschlossenen Behälter aufbewahren.



Maske über Nase und Mund platzieren und mit beiden Schlaufen hinter den Ohren fixieren

Symbolbild

## **ACHTUNG:**

Das Tragen von Stoffmasken ist nur dann sinnvoll und sicher, wenn sie richtig gehandhabt werden.