

Gebrauchsanweisung

Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) Art.-Nr.: 823.366 / 823.409 / 823.412

Stand Mai 2020



Atmungsaktiv



3-lagig



RICHTIGER UMGANG MIT SCHUTZMASKEN

1. **Vor dem Anlegen** gründlich Hände waschen oder desinfizieren.
2. Maske aus der Verpackung nehmen, **nicht auf der Innenseite anfassen**.
3. Die Maske über Mund und Nase anlegen und die Schlaufen hinter den Ohren befestigen. Stellen Sie sicher, dass die farbige Seite nach aussen zeigt.
4. **Den eingenähten Nasenbügel mit beiden Zeigefingern individuell an die Form der Nase anpassen.**
5. Während des Tragens Maske nicht mit den Händen berühren.
6. **Nach Gebrauch die Maske** an den seitlichen Schlaufen – **von hinten nach vorne** – vom Gesicht nehmen, **dabei Maske nicht berühren**.
7. Maske nach Gebrauch möglichst rasch in einem geschlossenen Behälter entsorgen.
8. **Hände anschliessend mindestens 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.**



Maske über Nase und Mund platzieren und mit beiden Schlaufen hinter den Ohren fixieren



Draht an der Nase mit den Fingern formen und individuell anpassen

ACHTUNG: Bei diesen Masken handelt es sich um „Einwegprodukte“. Gesundheitsexperten raten davon ab, Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) nach dem Gebrauch erneut zu verwenden, da das Risiko zu gross ist, sich dabei an der verunreinigten Aussenseite der Maske zu infizieren. Nach Gebrauch der Maske soll diese umgehend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt werden und anschliessend sollen die Hände gründlich mit Seife gereinigt oder desinfiziert werden.