



Atmungsaktiv

# Gebrauchsanweisung

## Mund-Nasen-Schutzmaske gemäss KN95 Standard Art.-Nr.: 825.115

Stand Mai 2020



### RICHTIGER UMGANG

### MIT SCHUTZMASKEN

1. **Vor dem Anlegen** der Schutzmaske die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren.
2. Die Schutzmaske aus der Verpackung nehmen, **die Innenseite dabei nicht berühren**.
3. Die Maske über Mund und Nase anlegen und die Schlaufen hinter den Ohren befestigen. Stellen Sie sicher, **dass die korrekte Seite nach aussen zeigt**.
4. Den **eingenähten Nasenbügel** leicht mit beiden Zeigefingern individuell **an die Form der Nase anpassen**.
5. **Nach Gebrauch die Maske** an den seitlichen Schlaufen – **von hinten nach vorne** – vom Gesicht nehmen, **dabei Maske nicht berühren**.
7. Maske nach Gebrauch möglichst rasch in einem geschlossenen Behälter entsorgen.
8. **Hände anschliessend mindestens 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife waschen oder desinfizieren**.



**Maske über Nase und Mund platzieren und mit beiden Schlaufen hinter den Ohren fixieren**



**Nasenbügel an der Nase mit den Fingern formen und individuell anpassen**

Symbolbilder

### ACHTUNG:

Das Tragen von Filtermasken ist nur dann sinnvoll und sicher, wenn sie richtig gehandhabt werden.

**Bitte beachten Sie:**

**Diese Masken sind kein Medizinprodukt und keine Schutzmaske nach der PSA (Persönliche Schutzausrüstung) Verordnung!**