

Ihre FFP2-Schutzmaske



Atmungsaktiv



Maske über Nase und Mund platzieren und mit beiden Schlaufen hinter den Ohren fixieren



4-lagig



Draht an der Nase mit den Fingern formen und individuell anpassen

So tragen Sie Ihre FFP2-Schutzmaske richtig:

1. Drücken Sie die Maske von aussen mit dem Nasenclip nach oben an das Gesicht.
2. Ziehen Sie die Schlaufen über die Ohren.
3. Formen Sie anschliessend den Nasenclip über das Nasenbein, damit die Maske gut sitzt.
4. Drücken Sie die Maske wieder von aussen an das Gesicht für eine gute Abdichtung.

Bei der Anwendung zu beachten:

1. Vor dem ersten Gebrauch das Verfallsdatum und die Maske kontrollieren.
2. Die Maske nach dem Verfallsdatum oder bei Beschädigung nicht mehr verwenden.
3. Die Maske nicht in der Mikrowelle erwärmen!
4. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Maske und der Ohrenschlaufen.
5. Die Maske in schlecht gelüfteten Räumen oder bei Sauerstoffmangel nicht verwenden!
6. Achten Sie darauf, die Innenseite der Maske nicht mit den Händen zu berühren.
7. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren!
8. Aufzubewahren in einem Temperaturbereich von -20° C bis 25° C (Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%)



Servus Handels- und Verlags-GmbH
Gewerbezone 16, 6404 Polling in Tirol, Austria